

# EL-COR ORANGE SOLVENT CE



ISTRUZIONI D'USO

Rev. 09-2015

## CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

Solvente di origine vegetale agli estratti di garofano con lanolina per la rimozione di cementi a base di ossido di zinco e materiali da impronta.

## UTILIZZO

Spruzzare il prodotto su un batuffolo di cotone o tovagliolo di carta e strofinare le superfici da trattare.

## AVVERTENZE

Prodotto ad uso esterno destinato esclusivamente agli specialisti in odontoiatria e stomatologia: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Indossare guanti adatti e proteggere gli occhi durante l'utilizzo.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori infiammabili. Nocivo per contatto con la pelle. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza e vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

## CONFEZIONI

2 flaconi da 250 ml. con micropompa erogatrice.

**FABBRICANTE:** Lang Dental Mfg Co., Inc. - 175 Messner Drive - Wheeling, IL 60090 USA

**MANDATARIO CE:** MediMark Europe Sarl - 11 rue E. Zola - BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2 - France

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia

**RAVELLI S.p.A. - Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI) - tel. 02 3357261 - [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)**

*Attenzione: le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)*