

GLAZE CE



ISTRUZIONI D'USO
Rev.09-2015

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

Resina liquida autopolimerizzante ad indurimento rapido. Indicata per riempire micro-porosità, sigillare i bordi di ribasature soffici, proteggere e lucidare resine acriliche per tutti i tipi di protesi e apparecchi ortodontici. Utilizzata su ponti e corone provvisori impedisce l'adesione della placca batterica riducendo i rischi di reazioni flogistiche.

APPLICAZIONE

Pulire ed asciugare bene la parte da trattare ed applicare uno strato sottile di GLAZE. Lasciare asciugare per circa 3 min. e ripetere l'operazione, se necessario, con uno o più strati successivi; non lucidare la parte trattata. Aggiungere periodicamente qualche goccia di DILUENTE per ripristinare la fluidità originale del prodotto.

AVVERTENZE

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Conservare i flaconi ben chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

CONFEZIONI

INTRODUCTION 2 x 30 ml. GLAZE + 30 ml. DILUENTE
RICAMBI GLAZE 30 ml. ; DILUENTE 30 ml.

PRIMER CE



ISTRUZIONI D'USO
Rev. 09-2015

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

Resina acrilica liquida che completa il suo ciclo di polimerizzazione a contatto con l'aria. Favorisce l'adesione dei materiali acrilici da ribasatura e per riparazioni alla protesi.

APPLICAZIONE

Irruvidire la parte da ribasare o da riparare e stendere un sottile strato di PRIMER; lasciare asciugare e procedere come di consueto.

AVVERTENZE

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Conservare i flaconi ben chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

CONFEZIONI

INTRODUCTION 2 x 30 ml. PRIMER + 30 ml. DILUENTE

RICAMBI PRIMER 30 ml.; DILUENTE 30 ml.

DILUENTE CE

**ISTRUZIONI D'USO****Rev.09-2015****CARATTERISTICHE E INDICAZIONI**

Liquido diluente per aumentare la fluidità dei prodotti GLAZE e PRIMER LANG.

APPLICAZIONE

Aggiungere il prodotto DILUENTE direttamente nel flacone di liquido GLAZE o PRIMER fino all'ottenimento della fluidità desiderata.

AVVERTENZE

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Conservare i flaconi ben chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

CONFEZIONI

RICAMBI DILUENTE 30 ml.

FABBRICANTE: Lang Dental Mfg Co., Inc. - 175 Messner Drive - Wheeling, IL 60090 USA

MANDATARIO CE: MediMark Europe Sarl - 11 rue E. Zola - BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2 - France

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia

RAVELLI S.p.A. - Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3357261 - www.ravellispa.it

Attenzione: le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it