

GLAZE



Utilizzo previsto

Sigillante per resine acriliche a esclusivo uso odontoiatrico/odontotecnico.

Altri materiali / attrezzature necessarie

1. Pennellino monouso.

Istruzioni per l'uso

1. Utilizzando un pennellino, applicare un sottile strato di Glaze sull'area che deve essere sigillata. Lasciare polimerizzare Glaze per 1-2 minuti. (Evitare strati spessi).
2. Ripetere il processo per ottenere una lucidatura brillante, se desiderato.

Nota: il Diluente può essere aggiunto a Glaze per ridurne la viscosità.

Precauzioni di manipolazione

Contiene metil metacrilato

Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde - Non fumare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. Conservare il materiale nel contenitore originale ben chiuso in posizione verticale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

Garanzia

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto solo presso distributori autorizzati. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, non utilizzato come indicato o non conservato nel contenitore originale.

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Drive
Wheeling, IL 60090 - USA



MediMark® Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.
BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2. France



Importatore esclusivo per l'Italia:
Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI)

LDDI 41 R.12 2021-07

Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it