

## CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

Resina acrilica autopolimerizzante per ribasature provvisorie (6-8 mesi) di protesi mobili, che rimane morbida per almeno 30 giorni; ideale per la stabilizzazione di protesi immediate.

## SETTORI D'IMPIEGO

- Ribasatura protesi provvisorie su impianti osteointegrati
- Estensioni e modificazioni dei bordi della protesi
- Ribasatura provvisoria di protesi immediate

## PREPARAZIONE DELLA PROTESI

Pulire bene la protesi con un detergente o in ultrasuoni e irruvidire la zona da ribasare salendo oltre i bordi per 3-4 mm. Per ottenere una maggiore soffici ta, eliminare un sufficiente spessore di protesi senza indebolirne troppo la struttura. Stendere un leggero strato di PRIMER LANG sulla superficie irruvidita per favorire una migliore adesione tra la protesi e IMMEDIATE. Proteggere con un isolante (tipo vaselina) le parti non interessate alla ribasatura.

## DOSAGGIO E MISCELAZIONE

Versare circa 6 ml. di liquido nel bicchierino graduato (dose per un completo superiore). Spruzzare lentamente la polvere, continuando a mescolare con una spatola, fino all'ottenimento di una massa fluida colabile.

## INDICAZIONI PER UNA CORRETTA RIBASATURA

Colare IMMEDIATE nella protesi: quando avr  raggiunto una consistenza plastica, stendere il materiale oltre i bordi sagomandolo con le dita leggermente inumidite. Posizionare la protesi in bocca facendo chiudere lentamente fino a completa occlusione; far eseguire i movimenti muco-dinamici ed attendere per circa 3 min. (con la bocca chiusa in occlusione centrica). Rimuovere la protesi e controllare che tutte le zone siano ben coperte di IMMEDIATE, altrimenti aggiungere seguendo lo stesso procedimento. Togliere il materiale in eccesso e riposizionare la protesi in bocca rimuovendola definitivamente dopo 5 min. circa.

## POLIMERIZZAZIONE

Si consiglia la polimerizzazione in idromuffola o in pentola a pressione con acqua tiepida (40°-45°C), a 2 atm., per 10 min. circa. In alternativa polimerizzare in acqua tiepida per 10 min. circa.

## RIFINITURA E LUCIDATURA

Rifinire con fresoni per resine morbide (tipo tagli QX e QFX della D+Z) e lucidare con peroni siliconici S.A.P. IDENTOFLEX. Pulire bene ed applicare uno o più strati sottili di GLAZE LANG sull'intera superficie ribasata, specialmente lungo la linea di unione tra IMMEDIATE e protesi. GLAZE è un sigillante protettivo che rallenta notevolmente il naturale degrado dei ribasatori dovuto all'assorbimento dei fluidi orali, bevande alcoliche, caffè, liquidi per pulizia protesi e azione batterica. Lo strato protettivo di GLAZE previene quindi decolorazioni, distacchi, screpolature e mantiene più a lungo la sofficità dei ribasatori soft.

## AVVERTENZE

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Conservare i flaconi ben chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce. Non inserire corpi estranei (spatole, contagocce, ecc.) direttamente nella bottiglia del liquido: per il dosaggio utilizzare solo l'apposito sottotappo contagocce. Liquido e polvere sono formulati per essere miscelati esclusivamente tra loro: si sconsiglia quindi l'utilizzo di liquidi e polveri diversi. Per la manipolazione del prodotto utilizzare guanti adatti. Rifinire sotto aspirazione od utilizzare una mascherina protettiva per le vie respiratorie.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

## CONSIGLI PER IL PORTATORE DI PROTESI

- Sciacquare la protesi sotto acqua fredda corrente senza utilizzare spazzolino o abrasivi.
- Nel periodo in cui la protesi non viene utilizzata immergerla in un recipiente con acqua fredda.
- Particolari abitudini del paziente (alcol, tabacco, ecc.) possono favorire il deterioramento e la decolorazione della ribasatura.

## COLORI

Rosa

## CONFEZIONI

<b>PROFESSIONAL</b>	120 gr. Polvere + 120 ml. Liquido + 7 ml. PRIMER + 7 ml. GLAZE
<b>RICAMBI Liquido</b>	120 ml. <b>RICAMBI Polvere</b> 120 gr.

**FABBRICANTE:** Lang Dental Mfg Co., Inc. - 175 Messner Drive - Wheeling, IL 60090 USA

**MANDATARIO CE:** MediMark Europe Sarl - 11 rue E. Zola - BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2 - France

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia

**RAVELLI S.p.A. - Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3357261 - [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)**

*Attenzione: le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)*