

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

Resine acriliche autopolimerizzanti per la costruzione di apparecchi ortodontici mobili e placche occlusali.

PREPARAZIONE DEL MODELLO

Immergere in acqua il modello fino alla completa espulsione delle bolle d'aria (circa 10-15 min. se il modello è molto asciutto). Fissare i ganci e le viti e applicare un isolante gesso-resina.

TECNICA A SPRUZZO

Inumidire con il liquido la superficie del modello solo nel punto dove si vuole cominciare a spruzzare la polvere; procedere alternando liquido e polvere fino all'ottenimento dello spessore desiderato.

TECNICA PER ZEPPATURA

Indicata nella costruzione di apparecchi complessi (tipo attivatori): versare in un mortaio 1 parte di liquido e 2,5 parti di polvere (in volume). Miscelare e adattare la resina sul modello, precedentemente isolato, aiutandosi con le dita inumidite.

POLIMERIZZAZIONE

Immergere immediatamente il modello in idromuffola o in pentola a pressione con acqua tiepida (45°- 50°C), a 2 atm., per 10 min. circa. Non aprire mai la pentola nei primi 5 min. per evitare porosità.

FINITURA E LUCIDATURA

Sgrossare con fresoni al carburo di tungsteno (tipo tagli AX e MX della D+Z) o abrasivi e finire con peroni siliconici LAB MIN o S.A.P. IDENTOFLEX (in alternativa alla carta vetrata). Lucidare come di consueto con un passaggio di pomice e UNIPOLISH. Per lucidare al meglio zone difficilmente raggiungibili (in prossimità di ganci e viti, ecc.), applicare la lacca lucidante GLAZE LANG e lasciare asciugare per circa 2 min.; otterrete così una perfetta lucidatura ed una più agevole rimozione dei residui di cibo da parte del paziente proprio in quelle zone dove, causa una non perfetta lucidatura, la placca tende a depositarsi.

AVVERTENZE

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Conservare i flaconi ben chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce. Non inserire corpi estranei (spatole, contagocce, ecc.) direttamente nella bottiglia del liquido: per il dosaggio utilizzare solo l'apposito sottotappo contagocce. Liquido e polvere sono formulati per essere miscelati esclusivamente tra loro: si sconsiglia quindi l'utilizzo di liquidi e polveri diversi. Durante la manipolazione del prodotto utilizzare guanti adatti. Rifinire sotto aspirazione od utilizzare una mascherina protettiva per le vie respiratorie.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

COLORI

Polvere: Trasparente

Liquido: Trasparente

CONFEZIONI**STANDARD**

400 gr. Polvere + 250 ml. Liquido

ECONOMY

800 gr. Polvere + 500 ml. Liquido

RICAMBI Liquido

250 - 500 - 1000 ml.

RICAMBI Polvere

400 - 800 gr.- 5 kg.

FABBRICANTE: Lang Dental Mfg Co., Inc. - 175 Messner Drive - Wheeling, IL 60090 USA

MANDATARIO CE: MediMark Europe Sarl - 11 rue E. Zola - BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2 - France

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia

RAVELLI S.p.A. - Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3357261 - www.ravellispa.it

Attenzione: le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it