

CARATTERISTICHE

Resina autopolimerizzante extra-soft per impronte funzionali, ribasature provvisorie e localizzazione di punti di pressione.

SETTORI D'IMPIEGO

- Condizionamento dei tessuti lesi
- Rilevazione di impronte dinamico-funzionali
- Adattamento di protesi immediate provvisorie
- Localizzazione di zone di decubito

PREPARAZIONE DELLA PROTESI

Pulire bene la protesi con un detergente o in ultrasuoni: irruvidire la zona da ribasare salendo oltre i bordi per 3-4 mm.; per ottenere una maggiore soffici ta, eliminare un sufficiente spessore di protesi senza indebolirne troppo la struttura. Proteggere con un isolante (tipo vaselina) le parti non interessate alla ribasatura.

DOSAGGIO E MISCELAZIONE

Versare circa 6 ml. di liquido nel bicchierino graduato (dose per un completo superiore). Spruzzare lentamente la polvere, continuando a mescolare con una spatola, fino all'ottenimento di una massa fluida colabile.

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA RIBASATURA

Colare TEMPO nella protesi: quando avr  raggiunto una consistenza plastica, stendere il materiale oltre i bordi sagomandolo con le dita leggermente inumidite. Posizionare la protesi in bocca facendo chiudere lentamente fino a completa occlusione; far eseguire i movimenti muco-dinamici ed attendere per circa 3 min. (con la bocca chiusa in occlusione centrica). Rimuovere la protesi e controllare che tutte le zone siano ben coperte di TEMPO, altrimenti aggiungere seguendo lo stesso procedimento. Togliere il materiale in eccesso e riposizionare la protesi in bocca per i controlli finali.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Condizionamento dei tessuti lesi e trattamento dei decubiti: prima di ribasare con TEMPO, rilevare le zone di pressione. Eliminare queste zone con una fresa e procedere come precedentemente descritto. Sostituire TEMPO ogni 15 giorni fino a fine trattamento.

Adattamento protesi transitorie post-implantari e post-chirurgiche: scaricare le zone di pressione ed effettuare la ribasatura. Sostituire TEMPO ogni 8 giorni fino a completa cicatrizzazione dei tessuti.

Impronte funzionali: lasciare la protesi ribasata in bocca al paziente per un periodo di 5/24 ore.

AVVERTENZE

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d'uso. Conservare i flaconi ben chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce. Non inserire corpi estranei (spatole, contagocce, ecc.) direttamente nella bottiglia del liquido: per il dosaggio utilizzare solo l'apposito sottotappo contagocce. Liquido e polvere sono formulati per essere miscelati esclusivamente tra loro: si sconsiglia quindi l'utilizzo di liquidi e polveri diversi. Per la manipolazione del prodotto utilizzare guanti adatti. Rifinire sotto aspirazione od utilizzare una mascherina protettiva per le vie respiratorie.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.

COLORI

Rosa

CONFEZIONI

PROFESSIONAL	120 gr. Polvere + 120 ml. Liquido		
RICAMBI Liquido	120 ml.	RICAMBI Polvere	120 gr.

FABBRICANTE: Lang Dental Mfg Co., Inc. - 175 Messner Drive - Wheeling, IL 60090 USA

MANDATARIO CE: MediMark Europe Sarl - 11 rue E. Zola - BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2 - France

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia

RAVELLI S.p.A. - Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3357261 - www.ravellispa.it

Attenzione: le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it